




CARTA FUSÃO CIRCULOS

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110

Carta Fusão Circulos

Cartões de Verificação de Supressão e
Disparidade de Fixação

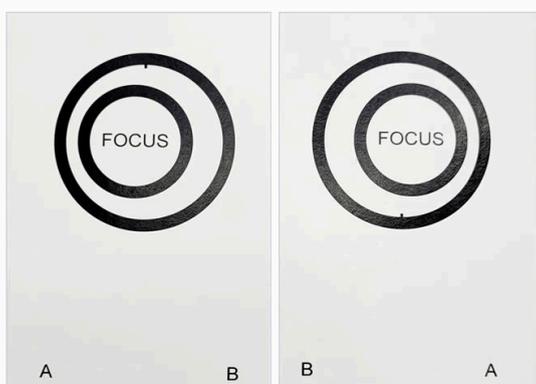

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Cartões de Verificação de Supressão e Disparidade de Fixação

Desenvolvidos para avaliações clínicas e treinamentos visuais, os cartões 710507 e 710517 são ferramentas essenciais para optometristas e profissionais da visão que atuam com terapia visual, diagnóstico de supressão ocular e análise de disparidade de fixação.

Especificações Técnicas:

- **Verificação Central de Supressão:**

- *Modelo 710507:* A palavra **FOCUS** é visível por ambos os olhos, permitindo identificar supressão em casos de ambliopia ou anomalias de binocularidade.
- *Modelo 710517:* A palavra **FUSE** é percebida por um olho, **TEXT** pelo outro, e **THIS** por ambos. Esse arranjo permite diferenciar quais estímulos cada olho está processando e avaliar possíveis falhas de fusão.

- **Teste de Disparidade de Fixação:**

- *Modelo 710507:* Marca de verificação localizada no topo do anel externo de um cartão e na base do anel do cartão oposto. Auxilia na detecção e correção de pequenas desalinhamentos visuais.
- *Modelo 710517:* Marcas posicionadas à esquerda de um cartão e à direita do outro. Ideal para ajustes finos na fixação e redução da disparidade.
- Compatível com óculos de filtros vermelho/verde.
- Exemplo: Com o cartão verde à direita e o filtro verde sobre o olho esquerdo, realiza-se **treinamento de divergência** ao fundir as imagens.
- **Treinamento de Convergência e Divergência:**

Material e Apresentação:

- Disponíveis em duas versões:
 - **Papel branco opaco** – ideal para uso clínico tradicional.
 - **Plástico transparente** – mais durável e fácil de higienizar.
-

Indicado para:

Terapias visuais, testes de supressão, avaliação de disparidade de fixação, treinamentos de fusão e exercícios de vergência.

Observação: O uso correto requer óculos com filtros vermelho/verde, não inclusos.

Manual de Instruções:

[CLIQUE AQUI](#) e baixe o manual de instruções deste produto.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110